

DISPOSABLE FACE MASK

Standard EN14683:2019 (TYPE IIR)

KÄYTTÖOHJE / TURVAOHJEET

Ref. No.: FB2RM-U

FI

3 Kerroksinen Suu-nenä suojain / Kirurginen Kasvosuojain (Kertakäyttöinen)

Suojaus: BFE \geq 99% (Bacterial Filtration Efficiency) ja roiskesuojattu.




Kasvosuojain / suu-nenä suojain pehmeällä, joustavalla ja vahvalla korvalenkillä sekä nenäpuristimella varmistaen hyvän istuvuuden. Suojaimessa on korkea bakteerien suodinteho \geq 99% . Suojain suositellaan käytettäväksi ristikontaminaation vähentämiseksi. Ei ole hengityssuojain, eikä henkilösuojain. Kertakäyttöinen, steriloimaton / tehdaspuhdas.

Turvaohjeet:

- Pese kädet ennen maskin asettamista.
- Maskin käyttäjää on opastettava maskin oikeaan käsittelyyn.
- Maski on vaihdettava välittömästi, jos se on vaurioitunut tai jos hengitysvastus nousee.
- Maski on poistettava varovasti kasvoista. Maskin ulkopintaa tulee välttää koskettamasta.
- Muista poistaa maski hihnoista pitämällä niitä korvien ympärillä.
- Älä käytä uudestaan. Hävitä se asianmukaisesti ja pese kädet.

Käyttöohjeet:

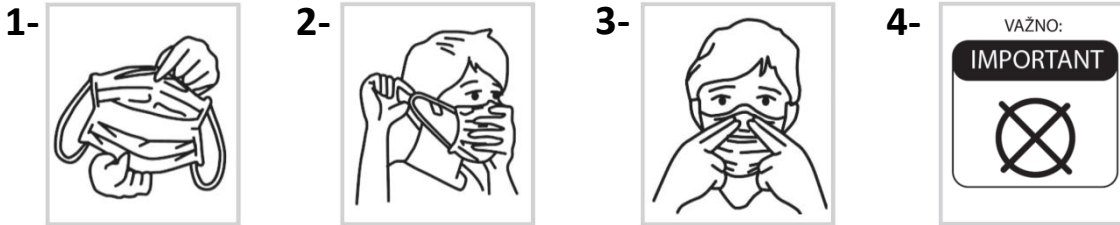

- 1 - Pidä maski käsissäsi nenäpidike ylöspäin. Vedä ja levitä maskia molemmilla käsillä.
- 2 - Pidä maskia kasvoilla ja vedä joustavat nauhat korviin
- 3- Aseta kaksi sormea nenäpidikkeen keskelle. Muotoile nenän pidike nenän muotoon.
Muotoileminen vain yhdellä sormella voi johtaa maskin huonoon tiivistykseen.
- 4 - Älä käytä uudestaan. Hävitä asianmukaisesti ja pese kädet.

Tuote hävitetään oikein:

Viruksen leviämisen estämiseksi hävitä tämä maski erilliseen pussiin muiden kotitalousjätien joukossa. Älä kierrättää.

Säilytysohjeet: Pidä säilytysalue kuivana huoneenlämpötilassa; Vältä altistumista sateelle, lumelle ja suoralle auringonvalolle. Älä pese maskia vedellä. Pidä poissa kipinät ja kemialliset höyryt. Vältä korkeaa painetta pakkauksissa.

Malli numero: FB2RM-U

Tuote koko: 17,5 x 9,5cm,

Paketissa: 10/50 kpl.

Eränumero: katso paketista.

Säilytysaika: 36 kuukautta

Valmistusaika: katso paketista.

IMPORTER / MAAHANTUOJA:

Focus Interiors Oy
Kuusipolku 35, 37150 Nokia
info@focusinteriors.fi