

### Tarvittavat työkalut

Ruuvimeisseli

Pora

Mittanauha

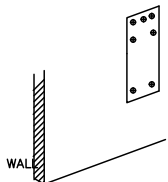

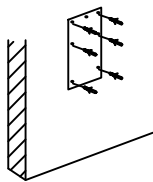
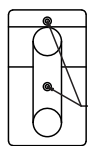
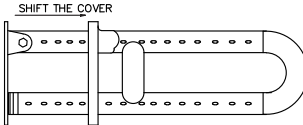
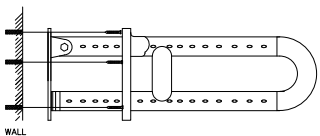
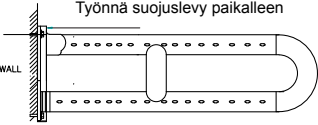
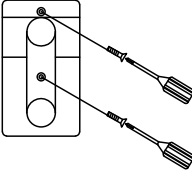
Kynä

Vatupassi

### Ennen asennusta

- varmistu, että valitut kiinnikkeet soveltuvat seinämateriaaliin sekä kannattavat maksimipainon.
- tarkista, että seinä on tarpeeksi vahva kannattamaan maksimipainon.
- tarkista ennen kiinnitysreikien poraamista olemassa olevien johtojen ja putkien sijainti.
- valitse materiaalin mukainen poranterä.
- wc-tuki on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

### Asentaminen

<p>1. Kiinnitä sabluuna seinälle haluttuun kohtaan.</p> 	<p>2. Pora 7 reikää (Ø 10 mm, syvyys 50 mm) sabluunan osoittamiin kohtiin.</p> 	<p>3. Aseta tulpat reikiin.</p> 	<p>4. Irrota wc-tuen suojuslevyn kaksi ruuvia.</p>  <p>Suojuslevyn kiinnitysruuvit</p>
<p>5. Vedä suojuslevy eteenpäin.</p>  <p>SHIFT THE COVER</p>	<p>6. Kiinnitä ruuvit.</p>  <p>WALL</p>	<p>7. Työnnä suojuslevy paikalleen.</p>  <p>Työnnä suojuslevy paikalleen</p> <p>WALL</p>	<p>8. Kiinnitä suojuslevyn ruuvit.</p> 

### Puhdistus ja käyttö

- Puhdista pinnat vedellä ja miedolla pesuaineella, kuivaa pehmeällä kankaalla. Älä käytä teräsvillaa, hankausaineita tai kemiallisia puhdistusaineita.
- Älä aseta erittäin kuumia tai kylmiä esineitä tukikahvaa vasten tai sen välittömään läheisyyteen.
- Älä lyö tukikahvaa kovilla tai terävillä esineillä.
- Älä istu tai seiso tukikahvan päällä.
- Älä katkaise kahvaa
- Tukikahvan maksimipaino on 120 kg (tukikahvan kantavuus, ei kiinnikkeiden tai seinän)
- Säilytä ohjeet.